




NAVODILA ZA SAMOTESTIRANJE

V 6 KORAKIH

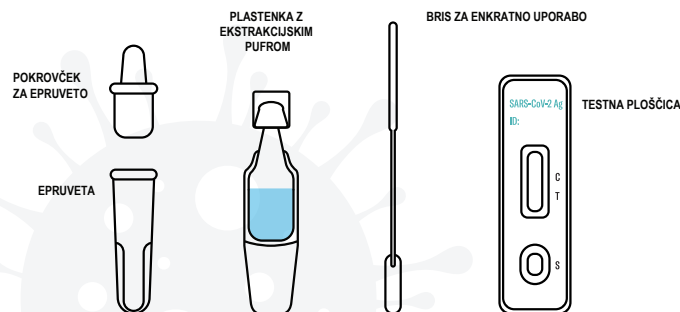

Za dodatne informacije se lahko obrneš na telefonsko številko Ministrstva za zdravje:
01/478 68 48, vsak delavnik med 8:30 in 15:30

PREDEN SE BOŠ SAMOTESTIRAL, SI TEMELJITO UMIJ ROKE IN OČISTI POVRŠINO MIZE. PRIBOR PO UPORABI ZAPRI V PLASTIČNO VREČKO.
PO TREH DNEH JO ODVRZI MED MEŠANE ODPADKE.



Pripravi celoten komplet:

- epruveto,
- pokrovček za epruveto,
- malo plastenko z ekstrakcijskim pufrm,
- bris za enkratno uporabo in testno ploščico.


Testno ploščico izvleci iz embalaže in jo položi na ravno površino.



ODSTRANI


EKSTRAKCIJSKI
PUFR

Odstrani pokrovček na
plastenki in ekstrakcijski
pufr prelij v epruveto

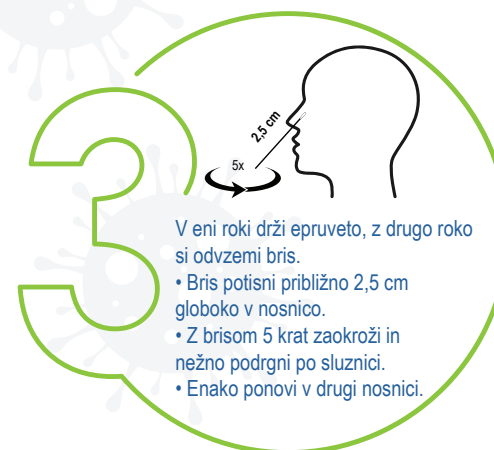


V eni roki drži epruveto, z drugo roko
si odvzemi bris.

- Bris potisni približno 2,5 cm
globoko v nosnico.
- Z brisom 5 krat zaokroži in
nežno podrgni po sluznici.
- Enako ponovi v drugi nosnici.

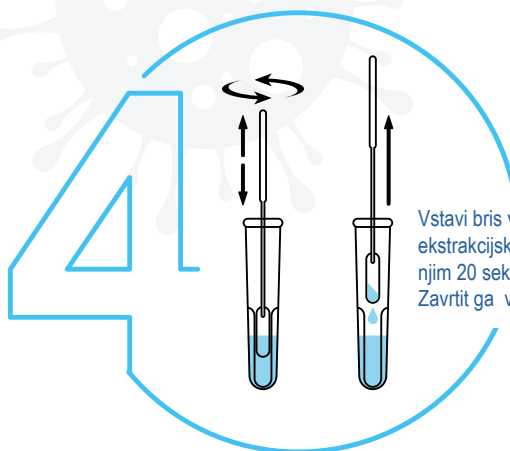

Vstavi bris v epruveto z
ekstrakcijskim pufrm in z
njim 20 sekund mešaj.
Zavrti ga vsaj 5 krat.

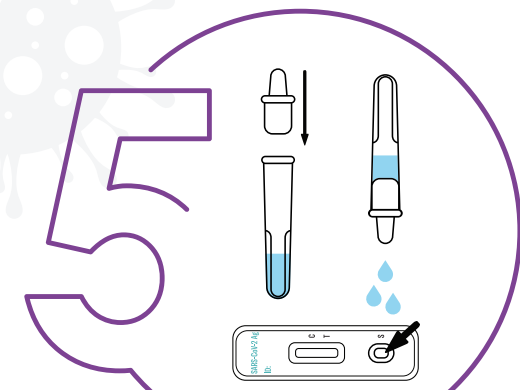


Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor.
Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice
v manjšo odprtino na testni ploščici.

Počakaj
15 minut



Rezultat
je tu:

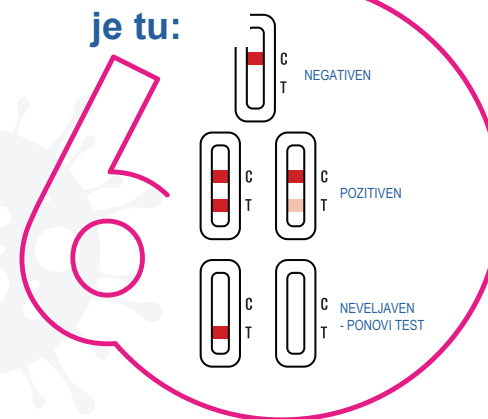

POZITIVEN REZULTAT?

POTREBNA JE SAMOIZOLACIJA.
NE DRUŽI SE Z LJUDMI.
STARŠI INAJ TE PRI TVOJEM ZDRAVNIKU NAROČUJO NA PCR TESTIRANJE

NEGATIVEN REZULTAT?

LAHKO SE VRNEŠ V ŠOLO.
SE NAPREJ UPOŠTEVAJ UKREPE ZA PREPREČEVANJE
ŠIRJENJA BOLEZNI.